

## エクセルシアES

### 試薬の排出方法

装置を長期間使用しない場合や廃棄する前には、下記の手順で試薬を全て排出してください。

1. 「1.Installation & Commissioning 装置設定と動作設定」を「Select」
2. 「7. Unload Reagents 試薬の排出」を「Select」
3. WW が点滅するのでワックス廃棄トレイにビニールをしき、WW にトレイを挿入する。  
点滅が消えない場合、「Confirm Empty」を押す
4. 「Unload」を押し W3を廃棄  
(ワックスが W3のバスから処理槽に入り、約20分後 WW に廃棄されます。処理槽を  
温める時間が必要なため)
5. W2および W1も同じように WW にトレイを入れて「Unload」を押しワックスを排出
6. 処理槽を洗浄するため、「Start」を押す
7. 洗浄終了したら、Ex2に空ボトルがあることを確認し、「Confirm Loaded」を押す
8. X3にカーソルがあるので、「Unload」を押すと、EX2に X3のキシレンが廃棄される
9. X2および X1も同じように EX2に排出
10. 「Start」を押し、処理槽を洗浄する。
11. F2にカーソルがある;「Unload」を押し、ボトルを取り外す
12. F1にカーソルがある;「Unload」を押し、ボトルを取り外す
13. F3にカーソルがある;「Unload」を押し、ボトルを取り外す
14. Fix1と Fix2を Unload し、ボトルを取り外す
15. Ex1が点滅しているので、空ボトルを置き「Confirm Loaded」を押した後、「Unload」を  
押し、A1を排出する
16. A6, A5,A4A3,A2の順に A1と同じように Ex1に排出する
17. 背面の主電源を切り、切れたことを必ず画面で確認してから、プラグを抜く