



エクセルシア

試薬の排出方法

装置を廃棄するときは、下記の手順で試薬を全て排出してください。

- 1. 「1.Installation & Commissioning 装置設定と動作設定」を「Select」を押してください。
- 2. 「7. Unload Reagents 試薬の排出」を「Select」を押してください。
- 3. WW が点滅するのでワックス廃棄トレイにビニールをしき、WW にトレイを挿入する。点滅が消えない場合、「Confirm Empty」を押してください。
- 4. 「Unload」を押し W3 を廃棄(ワックスが W3 のバスから処理槽に入り、約 20 分後 WW に廃棄されます。処理槽を温める時間が必要なため)
- 5. W2 および W1 も同じように WW にトレイを入れて「Unload」を押しワックスを排出します。
- 6. 処理槽を洗浄するため、「Start」を押してください。
- 7. 洗浄終了したら、Ex2 に空ボトルがあることを確認し、「Confirm Loaded」を押してください。
- 8. X3 にカーソルがあるので、「Unload」を押すと、EX2 に X3 のキシレンが排出されます。 ボトルに排出されたキシレンを廃棄してください。
- 9. X2 および X1 も同じように 7,8 を繰り返して EX2 に排出します。
- 10. 「Start」を押し、処理槽を洗浄してください。
- 11. F2 にカーソルがある;「Unload」を押し、ボトルに入っている試薬を廃棄してください。
- 12. F1 にカーソルがある;「Unload」を押し、ボトルに入っている試薬を廃棄してください。
- 13. F3 にカーソルがある;「Unload」を押し、ボトルに入っている試薬を廃棄してください。
- 14. Fix1 と Fix2 を Unload し、ボトルに入っている試薬を廃棄してください
- 15. Ex1 が点滅しているので、空ボトルを置き「Confirm Loaded」を押してください。
- 16. A1 にカーソルがあるので、「Unload」を押すと、EX1 に A1 のアルコールが排出されます。 排出されたアルコールを廃棄してください。
- 17. A6, A5, A4A3, A2 の順に A1 と同じように 15, 16 を繰り返して Ex1 に試薬を排出してください。
- 18. 背面の主電源を切り、<u>切れたことを必ず画面で確認</u>してから、電源コードのプラグを抜いてください。

202404