

スピントッシュプロセッサースTP120

フィルターの交換方法

STP120は、オプションとしてユニットに2枚のチャコールフィルターを装備しています。

システムは、フィルターの寿命を時間で管理しています。


装置の使用を開始すると、以下のメッセージが表示されます。

CHANGE FILTER
0400 HOURS
(フィルターの交換0400 時間)

表示された値 (例では 400 時間) は、フィルターが寿命に達するまでの残り時間を表示しています。

このカウンターが 0000HOURS(0000 時間)になったらフィルターを交換してください。

注意: フィルターを交換するときは、カールセルが停止位置にあり、実行中のプログラムがないことを確認してください。

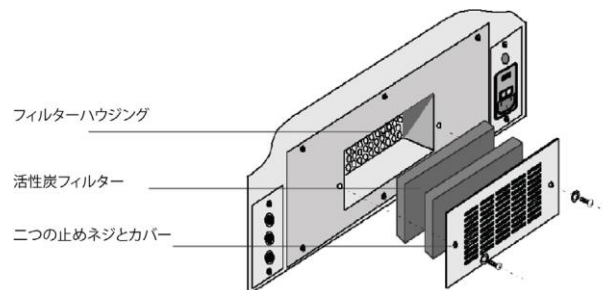

1. フィルターの交換方法は、装置背面にある2つのネジとカバーを取り外します。
2. 使用済みのフィルター2枚を取り外し、新しいフィルターと取り付けてください。
3. カバーをし、2つのネジを取り付けてください。
4. PROGRAMキーを押してください。
5. DOWNキーを押し、次のオプションに移動してください。
6. SETUP MENUでENTERを押してください。
7. DOWNキーを押し、4.Filter(フィルター)でENTERを押してください。
8. DOWNキーを押し、4.3 FILTER RESETを選んでENTERを押してください。
9. PROGRAMキーを押し、プログラムの編集モードを終了してください。

オーダーインフォメーション

品番	品名
184100	Active Charcoal Filter STP 120 2/包

202404