

サイトスピン4


サイトスピン4を用いた簡単なセルブロック作製

サイトスピン4では、Cell Block Preparation System(サイトブロック)を使用することにより、セルボタンの作製を容易に行えます。微量サンプルや視認できない検体でも標本作製が可能です。

サイトブロックの特長

- ・微量サンプルや視認できないサンプルでもセルブロック作製が容易です。
- ・穿刺吸引材料、ティッシュフラグメント、セルボタンを迅速に調整します。
- ・免疫組織化学にも最適です。

サイトブロックを用いたセルブロック作製手順

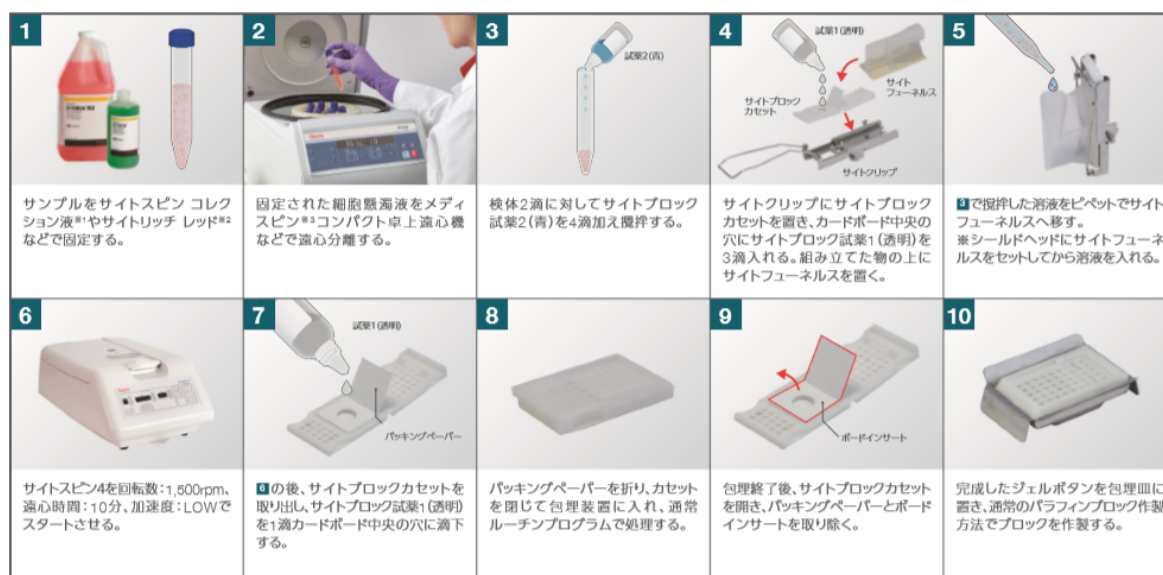

※1 Thermo Scientific™ Cytospin™ Collection Fluid ※2 Thermo Scientific™ Cytospin™ Red Collection Fluid ※3 Thermo Scientific™ Medispin™(販売名 メディスピ)

製品番号	品名	包装	標準価格
7401150	サイトブロック セル ブロック システム	50/包	¥49,000
7401151	サイトブロック リージェント (A & B、各 11mL)	各 1 本	¥9,800
5701AP	10%中性緩衝ホルマリン 3.8L	4/包	¥8,000
6768001	サイトスピン コレクション液 4 L	1 本	¥17,200
6768315	サイトスピン コレクション液 500 mL	2/包	¥9,700
B9990800	サイトリッチ レッド 4 L	1 本	¥25,700
B9990801	サイトリッチ レッド 500 mL	2/包	¥20,000